







راهنمای سریع پالس اکسی متر دیجیتال مدل ABADIS 907

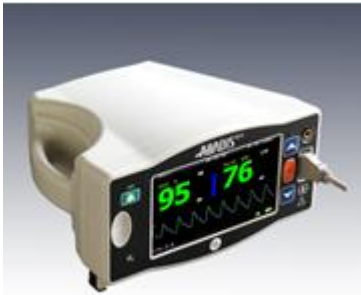


- سنسور را به کابل اتصال متصل کنید و سپس آنرا به کانکتور مربوط روی دستگاه وصل نمایید .
- برای روشن نمودن دستگاه ، کلید  را فشار دهید .
- دستگاه بعد از نمایش لوگوی شرکت و به صدا در آمدن آهنگ پیشواز روشن می شود .
- برای خاموش کردن دستگاه کلید  را فشار دهید .
- کلید آلارم جهت قطع موقت هشدار های صوتی تعبیه شده است .


• برای ورود به منو ها و تغییر تنظیمات دستگاه از کلید منوی تنظیمات  استفاده کنید .


• برای جابجایی در منو و کاهش مقادیر تنظیمات از کلید های منوی تنظیمات استفاده کنید .



• در صورت اتصال سنسور دما به محل تعبیه شده روی دستگاه میزان آن روی صفحه بصورت اتوماتیک نمایش داده خواهد شد .


• با انتخاب آیکن  قادر به تنظیم نوع بیمار در حالات بزرگسال و کودک ویا نوزاد وهمچنین تعیین حد بالا و پایین هشدار های دستگاه مربوط به مقادیر PULSE و SPO2 می باشد .

• با انتخاب آیکن  می توانید وارد منوی مربوط به ثبت اطلاعات بیمار در واحد زمان شوید .

• از آیکن  جهت ورود به منوی تنظیمات استفاده کنید .

• در صورت اتصال سنسور دما به محل تعبیه شده روی دستگاه میزان آن روی صفحه بصورت اتوماتیک نمایش داده خواهد شد .

• برای قطع برق ورودی به دستگاه از کلید خاموش – روشن که در پشت دستگاه قرار دارد استفاده کنید .

• برای بررسی میزان شارژ باطری هنگامی که دستگاه خاموش است کلید  را فشار دهید .

• هرگز از سنسور های متفرقه جهت اتصال به سیستم استفاده نکنید .

