



معیارهای رد نمونه و عدم پذیرش در بخشهای مختلف آزمایشگاه

معیارهای عمومی :

- ✓ عدم وجود شناسه های بیمار روی ظرف نمونه
- ✓ عدم همخوانی مشخصات بیمار روی برگه درخواست با اطلاعات روی ظرف نمونه
- ✓ شکستگی ظروف حاوی نمونه
- ✓ نشتن نمونه از داخل ظروف
- ✓ حجم کم نمونه
- ✓ گذشت مدت زمان مجاز، از زمان نمونه گیری تا تحویل نمونه به آزمایشگاه
- ✓ انتقال نمونه در نگهدارنده نامناسب
- ✓ انتقال نمونه در شرایط دمایی نامناسب
- ✓ عدم رعایت شرایط مربوط به آمادگی بیمار قبل از نمونه گیری

معیارهای عدم پذیرش و رد نمونه در بخش هماتولوژی

- ✓ نمونه های با لیبل مخدوش یا بدون لیبل
- ✓ نمونه های همولیز
- ✓ نمونه های ESR، CBC و تعیین گروه خونی و Rh که حاوی لخته هستند یا بدون ضدانعقاد گرفته شده اند عدم رعایت حجم نمونه و ضد انعقاد
- ✓ تحویل نمونه های ESR، CBC و تعیین گروه خونی و Rh پس از گذشت ۴ ساعت از نمونه گیری

معیارهای عدم پذیرش و رد نمونه در بخش آنالیز ادرار و مدفوع

- ✓ نمونه های با حجم کمتر از ۳ سی سی
- ✓ نمونه های ادرار غیر استریل
- ✓ نمونه های ادرار مشکوک به آلودگی با مدفوع
- ✓ گذشتن بیش از ۲ ساعت از زمان نمونه گیری ادرار
- ✓ نمونه های با لیبل مخدوش یا بدون لیبل
- ✓ جمع آوری مدفوع در ظروف نامناسب

معیارهای عدم پذیرش و رد نمونه در بخش بیوشیمی خون و ادرار

- ✓ نمونه های همولیز ، لیپمیک شدید ، ایکتریک شدید
- ✓ نمونه های با لیبل مخدوش یا بدون لیبل



- ✓ نمونه گیری در لوله های نامناسب (مثلا Ca , Fe , . . . در لوله های غیر اسید واش)
- ✓ جمع آوری ادرار راندم برای تست هایی که نمونه ۲۴ ساعته میخواهند
- ✓ عدم استفاده از مواد نگهدارنده برای نمونه های ادرار ۲۴ ساعته
- ✓ تحویل نمونه خون تام پس از گذشت دو ساعت از نمونه گیری (بدون اینکه سرم جدا شده باشد)
- ✓ نمونه های ادرار کمتر از ۱۰ سی سی
- ✓ نمونه هایی که از کیسه ادراری جمع آوری شده اند

معیارهای عدم پذیرش و رد نمونه در بخش سرولوژی

- ✓ نمونه های همولیز ، لیپمیک شدید ، ایکتریک شدید
- ✓ نمونه های با لیبل مخدوش یا بدون لیبل
- ✓ نمونه پلازما برای تست های Wright , Widal , CRP , RF , VDRL , ASO
- ✓ نمونه سیتراته و یا اگزالاته برای Osmotic Fragility

معیارهای عدم پذیرش و رد نمونه در بخش ایمونولوژی (HIV , HBs , HCV , H.P , B2mic ,)

- ✓ نمونه های همولیز ، لیپمیک شدید ، ایکتریک شدید
- ✓ نمونه های با لیبل مخدوش یا بدون لیبل
- ✓ فریز کردن و ذوب کردن مکرر
- ✓ استفاده از سرم های حاوی فیبرین

معیارهای عدم پذیرش و رد نمونه های مایعات بدن (CSF ، مایع پلور ، سینوویال ، . . .)

- ✓ نمونه های با لیبل مخدوش یا بدون لیبل
- ✓ حجم ناکافی
- ✓ ارسال در ظروف غیر استریل و نامناسب (نمونه ها بایستی در لوله های دریچ دار ارسال شوند)
- ✓ گذشتن بیش از ۲ ساعت از زمان نمونه گیری

معیارهای عدم پذیرش و رد نمونه در بخش بانک خون

- ✓ حجم ناکافی (کمتر از ۲/۵ سی سی برای کراس ماچ ، کومبس ، گروه خون
- ✓ نمونه های با لیبل مخدوش یا بدون لیبل
- ✓ نمونه های فاقد نام نمونه گیر ، ساعت نمونه
- ✓ نمونه های همولیز
- ✓ نمونه هایی که بیش از ۲۴ ساعت از زمان نمونه گیری آن گذشته باشد