

راهنمای نمونه گیری Bactec



اقدامات :

- ابتدا دستها را شسته و خشک می کنید .
- لایه فلزی درب ویال کشت را باز نموده ، ابتدا درپوش لاستیکی آن را با الکل ۷۰ درجه گندزدایی کنید .
- دستها را مجدداً هندراب کنید ، و دستکش بپوشید (در صورت لزوم ماسک و عینک محافظ انتخاب کنید) .
- محل نمونه گیری را ابتدا با بتادین و سپس الکل ضدعفونی کرده ، صبر کنید تا محل ضدعفونی خشک شود .
- بعد از نمونه گیری ، ابتدا سر ظرف نمونه گیری را با اسپری الکلی ضد عفونی کنید و نمونه را در داخل ویال تلقیح کنید بعد شیشه را با ملایمت تکان دهید تا خون با ماده ضد انعقاد sps مخلوط شود .

تعداد و زمان خونگیری :

نمونه گیری ترجیحاً بایستی در زمان تب صورت گیرد و فاصله بین دو نمونه حداقل ۲۰ دقیقه باشد .

حجم نمونه و انتقال نمونه :

- در بزرگسالان، ۱۰٪ حجم محیط کشت (۵ تا ۱۰ سی سی) نمونه خون گرفته شود .
- در کودکان ، ۲-۳ سی سی نمونه خون گرفته شود .
- بلافاصله بعد از نمونه گیری ، نمونه خون سریعاً به آزمایشگاه ارسال گردد .
- نمونه را نباید در یخچال گذاشت . بارکد روی شیشه نباید آسیب دیده یا مخدوش شود ، روی آن لیبل نچسبانید .

توجه :

ویالهای محیط کشت قبل و بعد از نمونه گیری ، به هیچ عنوان در درون یخچال قرار نگیرد .